

A vertical red bar on the left side of the page, featuring a white floral pattern of stylized flowers and leaves.

Eleganza 1

nejlepší investice



Eleganza 1

nejlepší investice



ELEGANZA

Lůžko Eleganza 1 s dělenými plastovými postranicemi + stolek Eleganza Classic



Eleganza 1 je plně elektricky nastavitelné, univerzální lůžko určené pro standardní nemocniční oddělení. Díky jednoduché konstrukci, vysokému stupni výbavy a příznivé ceně přináší lůžko Eleganza 1 zákazníkům vysokou přidanou hodnotu.

Nadstandardní parametry a sofistikované funkce jsou díky tomuto lůžku dostupnější pro širší skupinu zákazníků.

Výborný poměr výkon/cena

Nejvyšší úroveň bezpečnosti

- Plně vyhovuje EN 60601-2-52
- Nadstandardní výbava Safe Plus Concept

PROTECTOR
Safe Plus Concept

EXTENDER
Safe Plus Concept

BRAKE-ALARM
Safe Plus Concept

Nadstandardní funkčnost

- Bezpečná zátěž lůžka 250 kg
- Šířka lůžka < 100 cm
- Šířka plastové ložné plochy 90 cm
- Ergoframe 16 cm

Nadstandardní funkčnost

překoná Vaše očekávání

Lůžko může být vybaveno řadou volitelných funkcí a praktických vlastností. Díky této variabilitě lůžko uspokojí specifické potřeby všech standardních nemocničních oddělení.

1. HORIZONTÁLNÍ OCHRANNÁ KOLEČKA
2. POUZDRA PRO HRAZDU A INFÚZNÍ STOJANY
3. CENTRÁLNĚ OVLÁDANÁ KOLEČKA 150 mm
4. OCHRANNÉ POSTRANICE (str. 10–11)
5. BAREVNÉ DEKORY POSTRANIC A ČEL (str. 15)
6. BRAKE ALARM



7. KOMFORT I PRO VYŠŠÍ PACIENTY
| Prodloužení lůžka o 15 cm |
Demografické trendy jasně ukazují růst populace a především zvyšující se počet obyvatel s nadváhou. Pro vyšší komfort těchto pacientů je lůžko standardně vyráběno s 90 cm širokou ložnou plochou. Dále může být vybaveno 15 cm prodloužením ložné plochy.



8. PRAKTICKÝ PROSTOR PRO LŮŽKOVINY | Polička |
Praktická polička na lůžkoviny je umístěna v prostoru pod nožním čelem. Při výměně lůžkovin tak zůstává čisté a použité prádlo vždy oddělené. Poličku lze využít i pro uložení hlavního sesterského ovladače.



9. SNAŽŠÍ TRANSPORT
| 5.kolečko |
Aktivované 5. kolečko usnadňuje jízdu na dlouhých chodbách (lůžko drží přímý směr). Vytváří ve středu lůžka otočný bod, díky kterému dochází k usnadnění otáčení na malém prostoru (vjezd do výtahu, otáčení) a výraznému snížení síly potřebné k otočení lůžka.



10. ANTIDEKUBITNÍ LOŽNÁ PLOCHA

| Ergoframe 16cm |

Antidekubitního efektu je docíleno díky automatickému rozšíření ložné plochy o 16 cm. Při polohování zádového a stehenního dílu Ergoframe minimalizuje tlak a třecí síly v pánevní oblasti pacienta. Tím je docíleno snížení rizika vzniku proleženin v těchto krizových oblastech.



11. OPTIMÁLNÍ PROSTOR PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Lišty na příslušenství |

Lakované lišty mohou být dodávány v délkách 500 nebo 740 mm. Lišty jsou umístěny na obou stranách lůžka a jsou vždy vybaveny 2 nebo 4 posuvnými plastovými háčky. Na lištu lze zavěsit celou řadu drobného příslušenství (koš na bažanta, sáčky na moč, držák redonových lahví, držák kanyl, ...).



12. JEDNODUŠŠÍ MOBILIZACE

| Vstávací madlo |

Ložná plocha může být vybavena pouzdem pro vstávací madlo. Vstávací madlo vytváří optimální opěrný bod pro vstávání. Madlo vhodně doplňuje celý koncept nezávislé mobilizace.



13. RYCHLÉ ŘEŠENÍ RESUSCITACE

| 13a. Mechanické CPR |

CPR táhlo pro mechanické sklopení zádového dílu bylo umístěno v nožní části lůžka. Je tak vždy velmi snadno dosažitelné a to ve všech pozicích lůžka i postranic.

| 13b. Elektrické CPR |

Předprogramovaná funkce na hlavním ovládacím panelu – elektricky srovnává ložnou plochu a zároveň polohuje ložnou plochu do nejnížší polohy.



14. ZÁMKY ČEL

Čela lůžka mohou být fixována k rámu ložné plochy prostřednictvím jednoduchých zámků. Pokud jsou zámkové v horní poloze a je viditelný zelený symbol odemknutého zámku lze čela z lůžka odejmout. V dolní poloze jsou pak čela fixovaná k rámu lůžka.

Snadná čistitelnost

pomáhá chránit před nemocniční infekcí

PLASTOVÁ LOŽNÁ PLOCHA

Montáž, demontáž i samotné čištění ložné plochy je nyní výrazně snadnější a účinnější díky výjimečnému řešení vytvořenému z 8 samostatných odnímatelných plastových dílů. Ty jsou podobně jako čela či postranice vyrobeny bezspárovou technologií vyfukování. Díky své minimální hmotnosti (každý díl váží pouhých 700 gr) i rozměrům je toto řešení velmi praktické. Piktogram postavy vylišaný na každém díle slouží pro rychlou identifikaci správné polohy dílu na lůžku.

1. PIKTOGRAM PACIENTA
2. VÁHA POUHÝCH 700 gr
3. BEZSPÁROVÁ KONSTRUKCE
4. PLASTOVÁ LOŽNÁ PLOCHA
TVOŘENÁ 8 SAMOSTATNÝMI DÍLY



MINIMALIZACE INFEKCE



Při výrobě jednotlivých dílů je využíváno nejmodernějších bezspárových technologií, které minimalizují prostor pro nežádoucí infekce. Lůžko je tak z pohledu čistitelnosti velmi bezpečné a uživatelsky jednoduché.

JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE



Pro dosažení snadné čistitelnosti bylo lůžko Eleganza 1 od počátku navrhováno tak, aby bylo dosaženo maximálního zjednodušení celé konstrukce i jednotlivých dílů a ploch.

VŠECHNY SPOJE KRYTÉ



Čištění šroubových spojů je velmi problematické, až nemožné. Proto jsou všechny šroubové spoje na lůžku Eleganza 1 opatřeny krytkou.


Bezpečnější lůžko

garance maximální ochrany pacienta a sestry

Pro zvyšování bezpečnosti zdravotnických lůžek je stanovena řada předpisů a norem. Jednou z hlavních priorit produktů společnosti LINET je řešení všech technických uzlů se zaměřením na absolutní bezpečnost. Lůžko Eleganza 1 splňuje veškeré požadavky nejnovějšího standardu IEC 60601-2-52:2010, který (dle harmonizace legislativy jednotlivých států) vstupuje závazně v platnost od 1. 12. 2012 do 1. 4. 2013.




BEZPEČNÉ MEZERY – Všechny mezery na lůžku Eleganza 1 jsou navrženy s ohledem na bezpečnost:

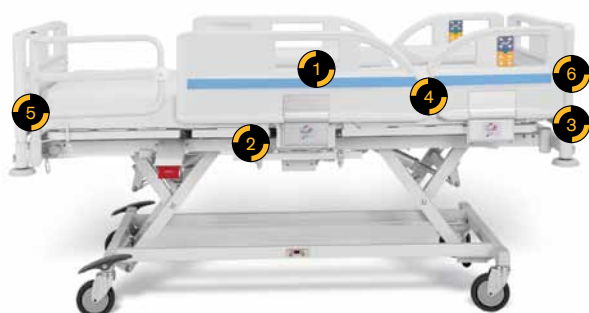

Plastové dělené postranice

1	Mezery v postranicích	✓
2	Prostor mezi postranicí a ložnou plochou	✓
3	Prostor mezi postranicí, ložnou plochou a čelem lůžka	✓
4	Mezera mezi postranicemi	✓
5	Mezera mezi postranicemi a nožním čelem	✓
6	Mezera mezi postranicí a hlavovým čelem	✓

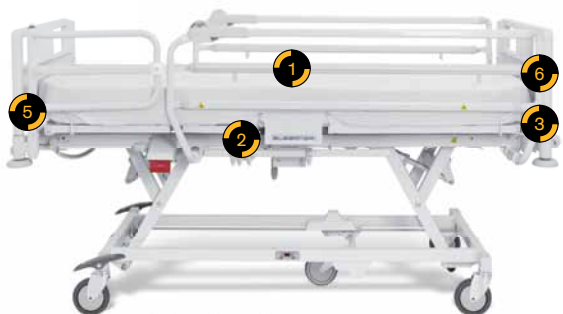

Jednodílné sklopné postranice

Bezpečnost lůžka byla potvrzena nejpres-
tižnější a nepřísnejší nezávislou zkušeb-
nou – německou společností TÜV. Ta pro-
vedla jednorázové i dlouhodobé zátěžové
testy, které potvrdily absolutní bezpečnost
a kvalitu modelu Eleganza 1 a vydala certi-
fikát kompatibility lůžka s normou
IEC 60601-2-52:2010.



NEJLEPŠÍ OCHRANA S ORIGINÁLNÍM PROTECTOREM

Použitím Protectoru je zajištěna ochrana v celé délce ložné plochy. Protector se umísťuje v nožní části lůžka a může být použit s oběma typy postranic. Použití Protectoru je doporučeno pro klienty se zvýšeným rizikem pádu z lůžka.



Promyšlené elektrické funkce

GO TLAČÍTKO

Bezpečnostní koncepce GO tlačítka chrání pacienta před úrazem vzniklým nechtěným pohybem lůžka. Pomocí GO tlačítka jsou všechny ovladače lůžka aktivovány po dobu 3 minut. V čase, kdy s lůžkem není vědomě polohováno, jsou ovladače automaticky deaktivovány a nemůže dojít k nechtěnému polohování. GO tlačítko je v rámci firemního konceptu „Bezpečnější lůžko“ používáno u všech výrobků LINET již od roku 2000.



ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PANEL

Základní ovládací a blokační panel je umístěn pod nožním čelem a je pevně spojený s rámem lůžka. Na tomto ovladači jsou umístěny základní předprogramované funkce (CPR, Protišoková poloha, náklon lůžka) a možnost deaktivace (uzamčení) jednotlivých funkcí na ručním ovladači.

SESTERSKÝ OVLÁDACÍ PANEL

Lůžko může být vybaveno hlavním ovládacím panelem. Díky dostatečně dlouhému kroucenému kabelu má vysokou flexibilitu při ovládání. Sestra má na hlavním ovladači možnosti kompletního ovládání včetně funkce Kardiackého křesla. Hlavní panel je volitelnou výbavou a nahrazuje základní ovládací panel.



PACIENTSKÝ SATELIT

Ovladač umístěný na pružném rameni je vždy dostupný a dobře dosažitelný. Ovladač je určen zejména starším pacientům, proto jsou symboly k ovládání jednotlivých funkcí velké a dobře čitelné. Tlačítka jsou odlišena různými barvami a pro pacienty se zrakovým postižením jsou provedena také jako reliéf.



ELEKTRICKÁ OCHRANA

DELŠÍ ŽIVOTNOST BATERÍ

Nabíjení baterie je řízeno optimálním způsobem, tím dochází k prodloužení její životnosti až o 2 roky. Baterie je neustále dostupná – baterie nemusí být aktivována.

OCHRANA MOTORŮ – SNIŽUJE SERVISNÍ NÁKLADY

Jedna z nejčastějších poruch motorů nemocničních lůžek je způsobována zaseknutím lůžka pod překážkou (parapet, ...) či jeho přetížením. Následné opravy jsou časově i finančně nákladné. Lůžko Eleganza 1 má samostatnou proudovou ochranu pro každý motor. Ta v případě přetížení motoru zamezí možnému poškození. Ochrana je elektronická a po odstranění přetížení je lůžko bez jakéhokoli zásahu připraveno k použití.

INTELIGENTNÍ SERVIS – MINIMALIZACE PORUCH

Koncept prevence poškození je založen na chytré řídicí jednotce lůžka, která na základě namáhání, zatěžování či opotřebení lůžka predikuje potenciální poruchu a servisnímu pracovníkovi doporučuje díly ke kontrole či servisnímu zákroku ještě před tím, než dojde k poruše. Lůžko je tak stále v provozu a je méně poruchové.

GARANCE VODOROVNÉ LOŽNÉ PLOCHY

Při nerovnoměrném zatížení lůžka dochází k jevu, kdy ložná plocha není v rovině a pacient je v nepříjemném náklonu. Díky funkci Synchronizace motorů, je na lůžku Eleganza 1 vždy zaručena vodorovnost ložné plochy (s výjimkou žádoucího náklonu u předprogramovaných funkcí)

RUČNÍ OVLADAČ

Ergonomický ruční ovladač pro pacienta a sestru umožňuje ovládání základních poloh lůžka. Ovladač je vybaven vyšetřovacím světlem. Noční obsluhu lůžka usnadní ovladač v provedení s podsvětlenou klávesnicí



OVLADAČ V POSTRANICI

Klinickými průzkumy bylo zjištěno, že ovladače umístěné v hlavových postranicích jsou výrazně lépe dostupné a umožňují pacientovi snazší obsluhu při nastavení základních poloh lůžka.

NOŽNÍ OVLADAČ

Nožní ovladač umožňuje praktické a snadné nastavení výšky ložné plochy a vyštvřovací polohy. Je vybaven mechanickou ochranou proti nechtěné aktivaci.



PLUG & PLAY

V případě některých diagnóz a stavů pacientů (např. při zmatení pacienta) je vhodné ruční ovladač zcela odejmout. Se zásuvkou Plug and Play umístěnou na liště příslušenství lze ovladač z lůžka odejmout během několika vteřin.

Plastové postranice

Postranice s novou odklopnou mechanikou vyniká vysokou bezpečností, snadnou obsluhou a velmi příznivou cenou. Sklápění postranic je řešeno otáčením okolo spodní osy postranice. Díky nízké hmotnosti, dokonalému vyvážení a dobře přístupnému odjišťovací madlu je k odjištění postranice potřeba minimální síla. Bezpečnost je garantována dvěma nezávislými pohyby nutnými pro odjištění.

1. PLASTOVÉ DĚLENÉ POSTRANICE

Ideální rozložení délky dělených plastových postranic mezi hlavovou a střední postranicí poskytuje pacientům dokonalou ochranu a vysoký standard bezpečnosti. Hlavové postranice mohou být vybaveny integrovanými ovladači. Tyto ovladače jsou pacientům vždy dokonale dostupné a zvyšují tak komfort ovládání lůžka.

2. BEZPEČNĚJŠÍ POSTRANICE

Všechny postranice jsou vybaveny dvoustupňovým bezpečnostním mechanismem.



*Plastové postranice
ve zdvižené poloze*



*Sklopené plastové
postranice*



Díky nízké hmotnosti, dokonalému vyvážení a velkému odjišťovací madlu je k odjištění postranice potřeba minimální síla. Bezpečnost sklápění postranice je v souladu s normou EN 60601-2-52 zaručena systémem odjištění dvěma nezávislými pohyby.

Jednodílné sklopné postranice

pro nezávislou mobilizaci

Ergonomicky umístěné ovládání jednodílných sklopných postranic, bylo poprvé umístěno v horní části postranice. Obsluha postranice je tak velmi ergonomická. Ke sklopení postranice poprvé stačí pouze jedna ruka. Postranice umožňuje samostatným pacientům, kteří nejsou zmatení ani ovlivnění medikací možnost získání větší nezávislosti.



1 ODĚRUVZDORNÁ LIŠTA

umístěná po celé délce prostřední tyče chrání postranici i celé lůžko před poškozením při transportu lůžka.

2 LIŠTA PŘÍSLUŠENSTVÍ

je s novou postranicí vždy výborně dostupná. Postranice ve sklopené poloze má výšku pouhých 23 cm a je sklopená podél matrace. Drobné příslušenství (bačkory, bažant, sáčky na moč, ...) je tak vždy dobře a jednoduše dostupné.

3 JEŠTĚ VYŠŠÍ OCHRANA

| 10 cm nástavec |

EXTENDER

Safe Plus Concept

V některých případech je vhodné poskytnout pacientovi zvýšenou ochranu. Jednoduše domontovatelný nástavec zvýší postranici o 10 cm a na lůžko tak lze umístit i vyšší typy aktivních matrací (až do výšky 26,5 cm).



Postranice nahoře



Postranice dole

Postranice se sklápí podél matrace. Pro odjištění a sklopení postranice stačí uchopit jednou rukou madlo a posunout celou postranicí směrem k hlavě pacienta. Ve druhém kroku, lze stisknout odjišťovací tlačítko a plynule spustit postranici do nejnižší polohy.



Technické parametry

TECHNICKÉ PARAMETRY

Při konstrukci lůžka byly zohledněny požadavky zákazníků na minimalizaci prostorových nároků, proto má lůžko šířku menší než 100 cm. Velmi dobře se tak vejde i do výtahů a vyhovuje i menším pokojům ve starších nemocnicích.



Zároveň však ložná plocha svou šířkou 90 cm poskytuje pacientovi maximální komfort.

V tomto segmentu univerzálních lůžek je nadstandardní i bezpečné zatížení lůžka dosahující až 250Kg.

BEZPEČNÉ ZATÍŽENÍ LŮŽKA

Kolečka		Baterie	
Rozměry	Brzděné	bez baterie	s baterií
125mm	Individuálně brzděné	185 kg	
	Centrálně brzděné	200 kg	250 kg
150 mm	Centrálně brzděné		

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	kolečka	
	125 mm	150 mm
Bezpečné pracovní zatížení	viz tabulka „Bezpečné zatížení lůžka“	
Vnější rozměry	99 × 218 cm	
Prodoužení lůžka	15 cm	
Ložná plocha	4 dílná elektricky nastavitelná	
Doporučené rozměry matrace	90 × 200 × 14	
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy	37–73,5 cm	39,5–76,8 cm
Elektricky nastavitelný zádový díl	0–70°	
Elektricky nastavitelný stehenní díl	0–39°	
TR/ ATR	15° – 15°	
Ergoframe®	10+6 cm	
Hmotnost lůžka	135 kg	
Norma	IEC:60601-2-52	
Ochrana proti vodě a prachu	IP 54	
Podjezdnost pro jídelní desky	16 cm	18,8 cm

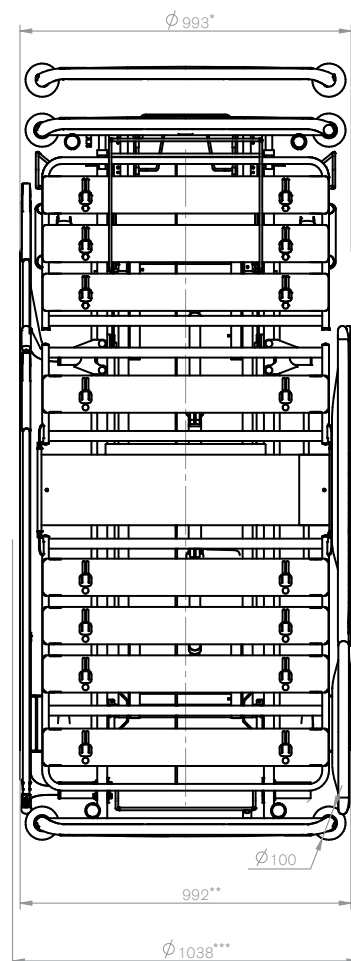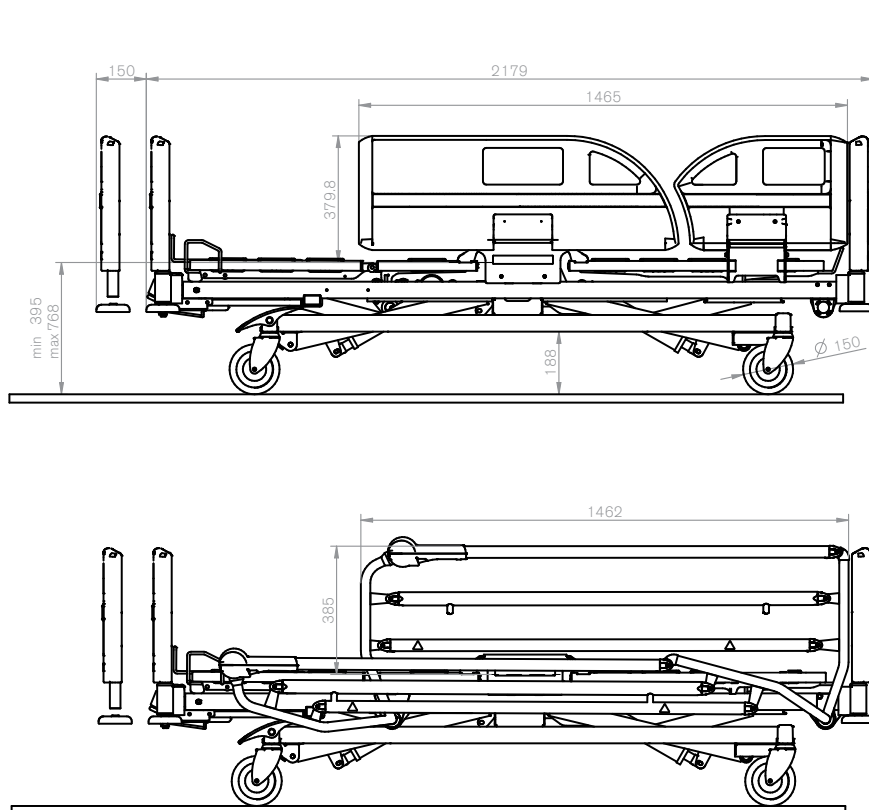

* s jednoduchými sklopnými postranicemi.

** s dělenými plastovými postranicemi v horní pozici.

*** s dělenými plastovými postranicemi v dolní pozici.

výťahová pozice – lůžko lze zkrátit o 2,5 cm.

Eleganza 1

široké možnosti výbavy

	Vlastnost / funkce	Standard	Objednací kód	Foto na straně.
OVLADAČE	Základní ovládací panel (MINI)	■	—	8
	Funkce Trendelenburg na Základním ovládacím panelu	□	NC04	—
	Hlavní sesterský panel na pružném kabelu	□	NC16	8
	Ruční ovladač	■	—	8
	Ruční ovladač s podsvícenou klávesnicí	□	HC15	8
	Satelitní ovladač na pružném rameni	□	OC01	9
	Zásuvka Plug and Play pro ruční ovladač	□	HC08	9
ČELA	Plastové čelo E1 bez dekorů	■	BE21	—
	Zámky čel (excentrické)	■	—	5
	Plastové čelo E1 s dekory	□	BE21 + CDXX	14
	Plastové čelo E3 s dekory	□	BE45	14
	Trubkové lakované čelo	□	BE46	14
POSTRANICE	Plastové postranice	□	SR22	9 + 10
	Plastové postranice s integrovanými ovladači	□	SR21	10
	Jednodílné sklopné postranice	□	SR11	11
	Extender pro jednodílné postranice	□	—	11
OSTATNÍ	Polička na lůžkoviny	□	LS01	4
	Lišta příslušenství 500 nebo 740 mm	□	AH01	5
	Záložní baterie	□	AC01	—
	Kolečka 125mm individuálně ovládané (SWL 185 kg)	■	—	—
	Kolečka 150 mm centrálně ovládané (SWL 250 kg)	□	CA35	2
	Kolečka + 5. kolečko	□	CA38	5
	Lůžko ve stříbrné barvě RAL 9006	□	CM02	—
PLOCHA	4 dílná ložná plocha (8 odnímatelných plastových dílů)	■	—	4 + 6
	Ergoframe (10 + 6 cm)	■	—	5
	Prodloužení ložné plochy + 15 cm	□	XT01	4
	Prodloužení matrace	□	4PRPROD MAT02	—
	Ložná plocha přizpůsobená pro vstávací madlo	□	—	—
	Vstávací madlo	□	—	5
	Matrace 200×90×14 cm	□	4PRE7KA2000	—
	Horizontální ochranné rolny	■	—	4
	Vertikální ochranné rolny	□	BV01	—
	4× pouzdra hrazdy a infuzního stojanu	■	—	4

■ Výbava základního modelu □ Volitelná (příplatková) výbava

Design

překoná Vaše očekávání



ELEGANZA

Lůžko Eleganza 1 s jednodílnými sklopnými postranicemi a designovými čely E3 + stolek Eleganza Classic



HRA BAREV

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
Účelný, střídmy a velmi atraktivní design lůžka Eleganza 1 vytváří spolu se širokou škálou barevných dekorů příjemné a moderní nemocniční prostředí. Řada trhů preferuje osobnější prostředí s dřevěnými prvky. V nabídce lůžka Eleganza 1 je i řada nejatraktivnějších dřevěných dekorů, které vhodně doplní každý interiér.



Modrá Oslo



Nektarinková




Kiwi




Grapefruitová



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
Akvamarínová




Bílá

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

Perlově bílá

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

Šedá

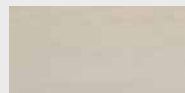

Javor bílý



Buk přírodní



Calvados červený




Zebra Moka

VARIANTY ČEL

Typická plastová čela E1 s barevným dekorativním pruhem mohou být nahrazena designovými čely E3. Designovými čely s většími dekorativními plochami lze Eleganza 1 opticky posunout mezi lůžka vyššího segmentu.

*Trubková lakovaná
čela s barevným HPL
panelem*

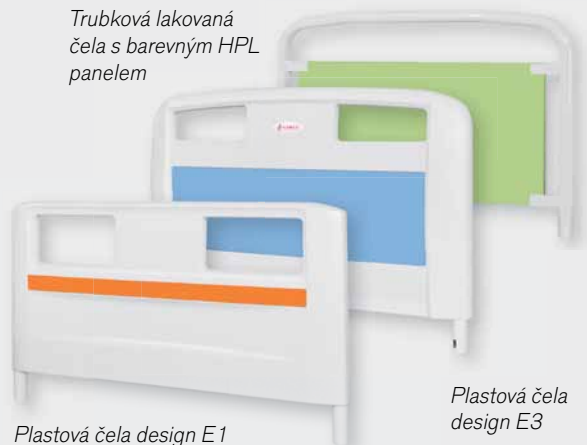

Plastová čela design E1

*Plastová čela
design E3*

Eleganza 1

překoná Vaše očekávání



LINET spol. s r.o.

Želevčice 5, 274 01 Slaný, Česká republika

tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: info@linet.cz, www.linet.cz